
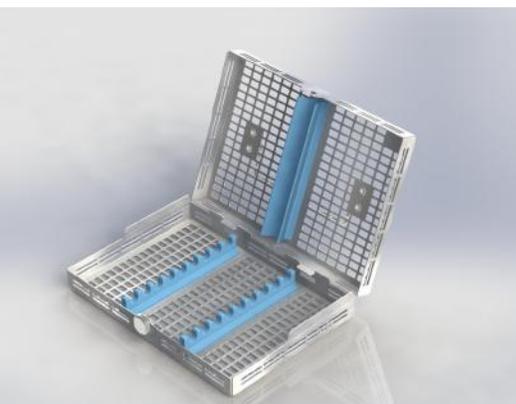


# Le concept

Le concept de CF System vous permet de vous concentrer sur vos patients au lieu de perdre un temps précieux à chercher les instruments pour compléter un acte opératoire.

En standardisant votre gestion des instruments, du nettoyage jusqu'au travail au fauteuil, vous optimisez votre temps de travail et par conséquent le rendement de votre cabinet.

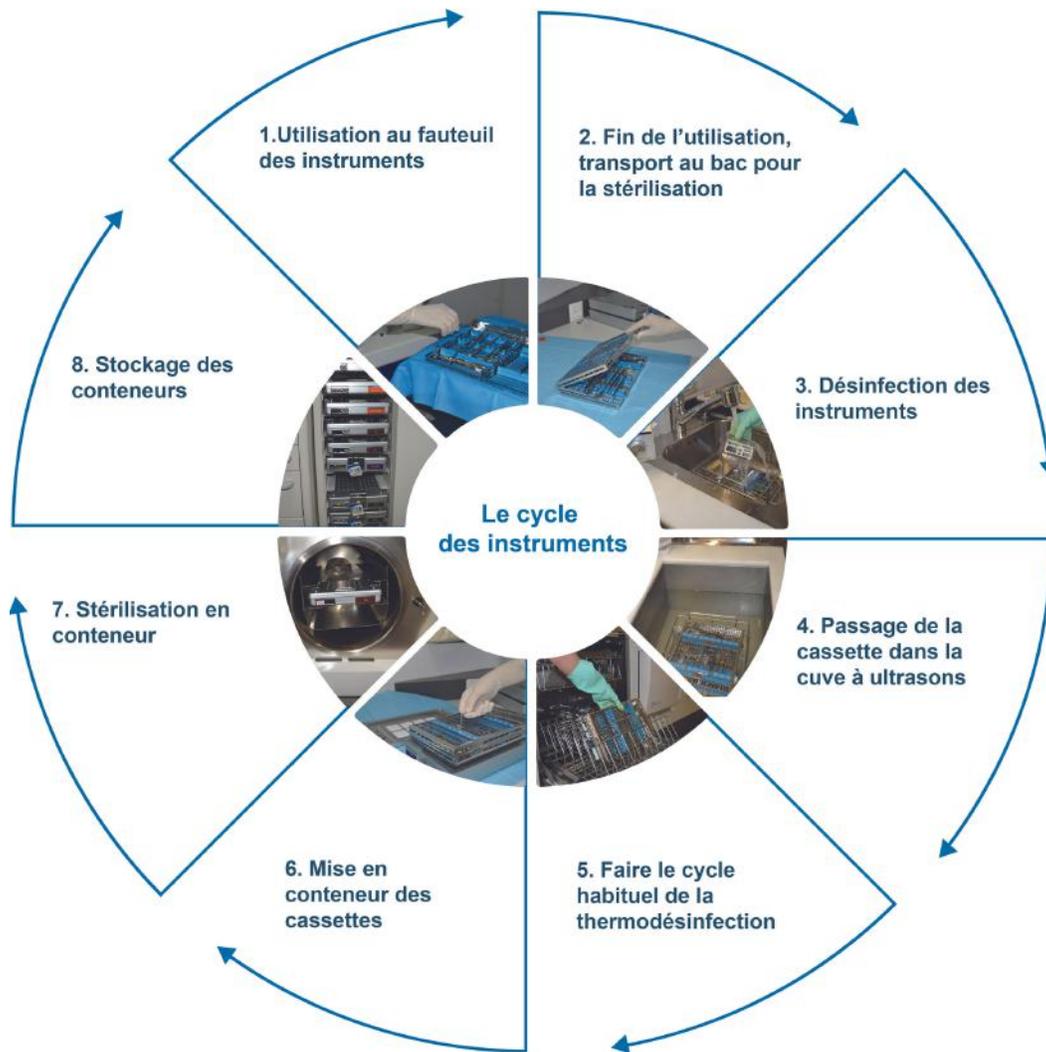

## Les étapes de l'utilisation au fauteuil

L'utilisation est simple et rapide. Les étapes ci-dessous décrivent l'utilisation des produits CF System et leur intégration au sein du cabinet. Les instruments restent stériles tant que le conteneur n'est pas ouvert. La manipulation se fait en toute sécurité pour le patient et le personnel soignant.



**1** Conteneur prêt à l'emploi : prenez votre conteneur selon le type de traitement.



**2** Ouverture du conteneur. A l'intérieur des cassettes, vos instruments sont stériles.



**3** Saisissez la cassette grâce au manche prévu à cet effet.




**4** Préparation et installation de vos instruments sur votre table de travail pour le traitement.



**5** Une fois le traitement terminé, rangez vos instruments entre les protections en silicone après avoir enlevé les grosses salissures.



**6** Vos instruments sont maintenant rangés et vous pouvez déplacer le conteneur en toute sécurité.

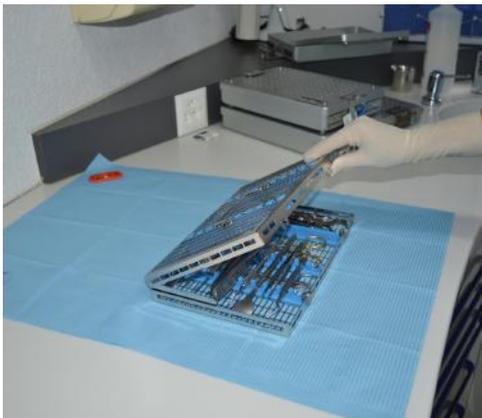

**7** Fermez la cassette pour passez aux étapes de la stérilisation.



**8** Transportez votre cassette dans un bac vers le lieu de stérilisation.

# Les étapes du nettoyage et stérilisation

Les étapes de stérilisation ne changent pas et de vos gestes restent les mêmes. La manipulation des instruments est supprimée et vous fait donc gagner un temps considérable. Le nettoyage et la stérilisation des instruments se fait de manière sécurisée et avec autant de facilité.

## Nettoyage



**1** Commencez la stérilisation comme vous le faites d'habitude dans les baigns de décontamination.



**2** Ensuite, rincez abondamment sous l'eau du robinet.



**3** Placez la cassette dans la cuve à ultrasons (optionnel).



**4** Après la cuve à ultrasons, rincez à l'eau du robinet.



**5** La cassette s'adapte parfaitement dans le thermodésinfecteur. Les instruments resteront maintenus et nettoyés de façon optimale.

## Stérilisation



**6** Rangez la cassette dans le conteneur une fois sortie du thermodésinfecteur.



**7** Fermez le conteneur avec les fermetures qui se situent aux extrémités.



**8** Mettez le plomb de sécurité et l'étiquette de traçabilité puis placez dans le stérilisateur.



**9** Après la stérilisation du conteneur, retirez-le avec un gant de protection.



**10** Laissez refroidir à l'air libre et votre conteneur est à nouveau prêt à l'emploi.



**11** Instruments stériles et prêts à usage stockés directement en salle de traitement.

# Les avantages



## Pour le praticien

- Optimise la productivité, en vous donnant plus de temps pour fournir aux patients des soins de qualité supérieure
- Economies réalisées sur les instruments car moins d'usures et de pertes d'instruments
- Réduit les coûts
- Les cassettes garantissent un meilleur nettoyage des instruments grâce à la position idéale des instruments dans le bain à ultrasons et dans le thermodésinfecteur



## Pour l'assistant-e dentaire

- Le concept aide à la standardisation des actes et supprime la dépendance envers une personne
- Moins de pertes, les sets d'instruments restent complets
- La réduction de la manipulation des instruments permet de diminuer les risques de blessure
- Capacité de neuf conteneurs 1/2 DIN par cycle de stérilisation



## Pour le patient

- Assurance que le cabinet fournit des actes opératoires sûrs
- Augmente la confiance envers le cabinet pour la qualité de stérilisation des instruments
- Garantie de la stérilité des instruments grâce au plomb de traçabilité
- Rendez-vous écourtés car plus de perte de temps à la recherche d'instruments durant un traitement



# Contact

Nous serons ravis de pouvoir vous conseiller sur l'ensemble de nos produits dentaires. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions ou demandes d'informations.

N'hésitez pas à nous contacter !

TALC Sàrl  
Rouges-Terres 7  
2900 Porrentruy

Tél: 032 466 75 55  
E-mail: [info@cfsystem.ch](mailto:info@cfsystem.ch)  
Site web: [www.cfsystem.ch](http://www.cfsystem.ch)



[www.cfsystem.ch](http://www.cfsystem.ch)

N'hésitez pas à visiter notre site Internet, où vous trouverez plus d'informations et des photos de nos produits.